



INSTRUMENTS



DENTASEPT®

Aspiration SA

INDICATIONS

Dentasept® Aspiration SA est une solution détergente désinfectante concentrée pour le traitement quotidien de tous types de systèmes d'aspiration, séparateurs d'amalgame et crachoirs.

AVANTAGES DU PRODUIT

- ✓ Non moussant
- ✓ Triple action – nettoie, désinfecte et désodorise
- ✓ Contient des agents désincrustants
- ✓ Dilution très économique à 2% : 1L de concentré = 50L de solution prête à l'emploi
- ✓ Temps de contact : 15 minutes
- ✓ Large spectre d'activité antimicrobienne
- ✓ Dispositif médical de classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée)

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 13727.
Mycobacterium tuberculosis (BK).
Levuricide : EN 1275, EN 13624.
Actif sur : HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV).

COMPOSITION QUALITATIVE

Ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, tensio-actif non ionique, agents désincrustants.

CONDITIONNEMENT ET ACCESSOIRES

Flacon doseur d'1 litre.
Bidon de 5 litres avec pompe doseuse.
Dentasept® ASP System (424050).



(424050)



INSTRUMENTS

DENTASEPT® Aspiration SA

PROTOCOLE D'UTILISATION

Dentasept® Aspiration SA est une solution détergente désinfectante concentrée pour le traitement quotidien de tous types de systèmes d'aspiration, séparateurs d'amalgame et crachoirs.


AVANT UTILISATION

Porter des gants appropriés.

COMMENT L'UTILISER

A la fin de la journée, préparer 2 litres de solution diluée à l'aide du Dentasept® ASP System.

- 1 Diluer à 2% (40ml pour 2 litres d'eau).
Flacon 1 litre : Remplir le doseur jusqu'à l'indicateur 20ml, puis répéter l'opération.
Bidon 5 litres : 2 pressions de pompe.
- 2 Secouer délicatement le Dentasept® ASP System pour mélanger la solution.
- 3 Connecter le Dentasept® ASP System au système d'aspiration et aspirer la solution diluée.
- 4 Laisser la solution agir pendant un minimum de 15 minutes. Il est possible de laisser la solution agir pendant la nuit.
- 5 Avant de le réutiliser, remplir le Dentasept® ASP System avec 1 litre d'eau propre minimum et l'aspirer dans le système d'aspiration.

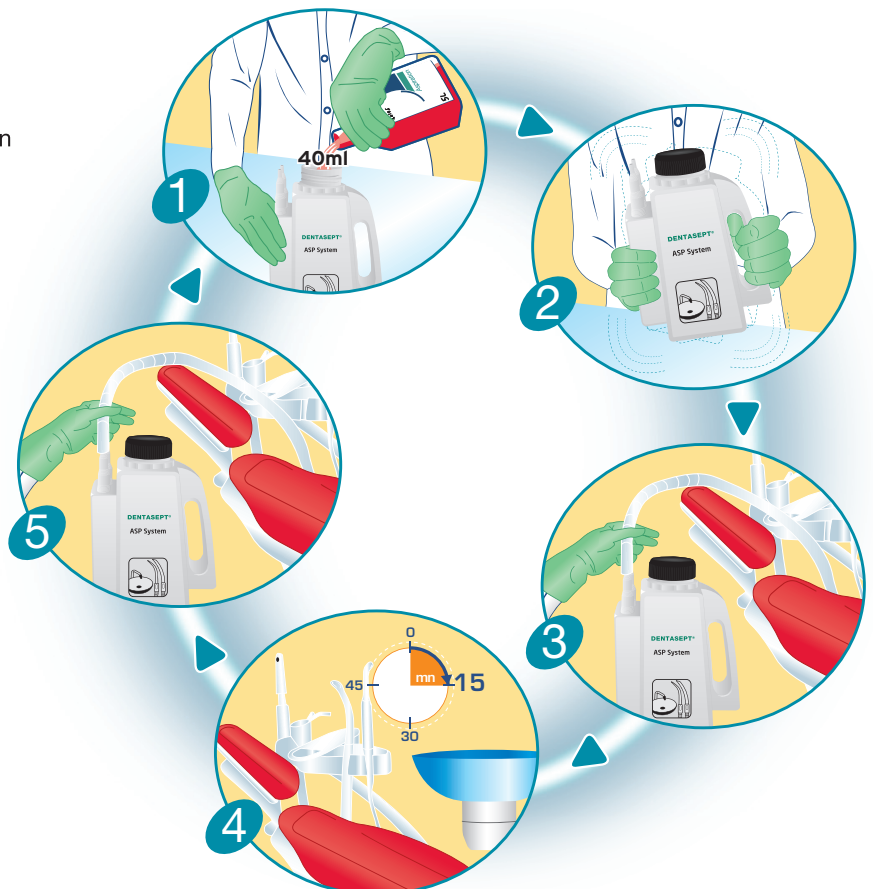

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser au minimum une fois par jour. Toujours lire la Fiche de Données de Sécurité pour les précautions d'utilisation relatives au produit. Selon la Directive Européenne 99/45/EEC et ses adaptations, Dentasept® Aspiration SA est classé comme une préparation dangereuse.

Conserver entre +5°C et +35°C.

 D.M.D. Groupe Anios - Pavé du Moulin - FR-59260 Lille Hellemmes.